

Rengöringsrutin unit Castellini

Uppsugningsfilter

- Kontrollera/rengörs efter varje arbetspass.
- Töm filtret genom att skölja det under rinnande vatten över skålen, där det finns en amalgamavskiljare 1 gång i veckan eller oftare vid behov.
- Använd skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.
- Innehållet måste omhändertas bland specialavfall i enlighet med gällande lokala och nationella lagar.



Daglig spolning av sugslangar

- Efter varje arbetspass, samt efter blodiga behandlingar, ska sugarna spolas igenom med det automatiska uppsugningsprogrammet.
- Utför programmet genom att använda en upphandlad produkt av Region Jönköping
- Fontän- sugs igenom med upphandlat rengöringsmedel avsett för ändamålet.
- Görs med automatiskt program eller manuellt. Görs det manuellt använd 0,5 dl rengöringsmedel per 2 liter vatten.
- Sug sedan igenom slangarna med endast 2 liter vatten.
- För att nå maximal rengöringseffekt ska luft och rengöringsmedellösning sugas in samtidigt.
- Görs detta manuellt ska avsedd behållare för ändamålet användas.
- Använd skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.



Sugslangsadapterar och sugslangar daglig rutin

- Sugslangsadapterar rengörs i diskdesinfektor efter avslutat arbetspass.
- Slutdelarna och slangarna bytas ut vid den årliga servicen av servicetekniker
- Använd skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.



Skålens filter

- Töms dagligen, skölj det under rinnande vatten. Filtret kan diskas i diskdesinfektor efter behov.
- Innehållet måste omhändertas bland specialavfall i enlighet med gällande lokala och nationella lagar.
- Använd skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.



Skål

- Tvättas noga vid slutet av arbetsdagen.
- Använd skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.

Instrumentstöd och instrumentbricka

- Desinficera efter varje patient med ytdesinfektionsmedel.
- Silikonskyddet är borttagningsbart och kan rengöras i diskdesinfektorn vid behov.

Dagligt rengöringsprograminsturmentslangar

- Utför en automatisk spolning av instrumentslangarna (ett kort program) varje morgon och kväll.



Autosteril veckovis

- En gång i veckan ska en desinficeringscykeln av sugslangar genomföras (ett långt program).
- Blanda 2 liter vatten med 100ml upphandlat rengöringskoncentrat i en Orocup.
- Anslut sugslangarna och låt suga upp 1 liter vatten, låt stå minst 30min, och max 120 min, görs lämpligen t.ex på en lunchrast.
- Slå sakt ner resterande blandning i spittoonen.
- Avsluta rengöring med att suga igenom 1 liter vatten.
- Vid stängning för dagen ska en daglig rengöring göras, se rutin under ”rutin kväll” ovan
- Användning av andra produkter eller H₂O₂ i annan koncentration kan skada apparaturen.

Den dentala behandlingens ytor och stolens klädsel

- Desinficera med ytdesinfektionsmedel, låt verka och torka.
- Spruta inte direkt på apparaturen.
- Använd inte produkter med slipmedel.
- Felaktig användning eller användning av icke godkända produkter kan skada utrustningen.
- Använd neutral tvål och skölj av hårt smutsade ytor.

Operationslampa

- Rengör lampan enbart när den har nått rumstemperatur.
- Frontalskärm och parabol: rengör med en mjuk trasa och vatten och neutral tvål.
- Andra ytor: som den dentala behandlingens ytor, se ovan.