

Rengöring av sår- och bendusch

Vid tvätt av till exempel underben med sår kan en hink eller tvättkar användas.

Ytskiktet på hink och tvättkar ska vara reptåligt, slätt och lätt att rengöra för att kunna möjliggöra rengöring och desinfektion. Viktigt att ytskiktet är helt, annars behöver de bytas ut.

Rådgör med vårdhygienisk expertis för att välja kar som är lätt att rengöra och desinfektera.

Rengöring av tvättkar och hink

Innan patient

Plastpåse kan användas vid behov för att skydda hink eller tvättkar mot olika medel, exempelvis Kaliumpermanganat.

Efter patient

Hinken rengörs i spol- eller diskdesinfektor, med fördel i spoldesinfektor. Intorkad smuts eller blod ska tas bort innan körning i diskdesinfektor.

Efter varje användning av tvättkar eller hinkar som inte kan köras i spol- eller diskdesinfektor, utförs mekanisk rengöring med diskborste, rengöringsmedel och vatten. Skölj rent och torka torrt. Torka därefter tvättkar/hink, duschslang, duschhandtag samt tagytor med ytdesinfektion.

Diskborste ska inte köras i diskdesinfektorn. Släng och byt ut diskborste vid behov, utifrån frekvens av användning.

Rengör inte med material eller medel som kan repa ytskiktet.