

Hygieninstruktioner för röntgen

Intraoral röntgen

Röntgensensorn placeras i ett sensorskydd av plast innan och under röntgentagning.

Efter utförd röntgentagning:

- Ta bort sensorskyddet och kassera.
- Torka av sensorn med en lätt fuktad duk med ytdesinfektion. Undvik att fukt, saliv eller desinfektionsmedel kommer in i sensorn. Om sensorn blivit fuktig, torka torrt batteriytan.
- Torka av sladd, röntgenkon, exponeringsknapp och patientkrage med ytdesinfektion.
- Rengör röntgenhållarna i korg i diskdesinfektor.

Panoramaröntgen

Bitpinnen

- Ta bort bitpinnen efter varje patient och desinfektera den i diskdesinfektorn.
- Om hygienskydd används, avlägsna det och desinfektera bitpinnen med ytdesinfektionsmedel.

Desinfektion av utrustning

- Ytdesinfektera huvudströmbrytaren, hakstöd, sidostöd, öronpinnar, manöverpanel och exponeringsknapp efter varje patient.