

## Rengöring av lustgasutrustning, Folktandvården

### Näsmask och adaptrar

- Näsmask och adaptrar byts mellan varje patient och torkas av från synlig smuts på behandlingsrummet innan rengöring. Näsmask delas och adaptrar läggs i korg och diskas i diskdesinfektor. Placera delarna så att vattnet inte samlas i dem. Se till att alla delar är torra före förvaring.
- Ny diskning ska ske veckovis om inte utrustningen används oftare än så.

### Patientslang

- Engångspatientslang som byts och kasseras efter användning mellan varje patient  
eller
- Flergångspatientslang som rengörs i diskdesinfektor som har en insats för diskning av lustgas samt ett program avsett för detta. Vid frågor avseende utrustning kontakta Dentalservice.

### Andningsblåsa och färskgasslang

- Torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid mellan varje patient.
- Efter rengöring görs en kvalitetskontroll för att säkerställa att inga hål eller sprickor finns.

### Lustgasmixer/flödesmätare

- Rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid mellan varje patient.
- Torka inte av det vita membranet på framsidan av den kromade delen på lustgasmixern (bagtee), där blåsan och färskgasslangen sitter med ytdesinfektionsmedel då det finns risk att det vita membranet klibbar ihop och tappar sin funktion.