

Hantering av prover i isvatten

Vissa prover ska placeras omedelbart i isvatten och lämnas snarast till laboratoriet för omhändertagande. Viktigt att även provröret ska vara iskyllt innan provtagningen.

Material

1. Plastmugg
2. En handske
3. Rätt rör för analys
4. Isbitar

Utförande

1. Lägg isbitar i en plastmugg
2. Spola kallt vatten. När vattnet är kallt – fyll på vatten i plastmuggen med is.
3. Provröret stoppas inuti ett finger i en provtagningshandske som sätts i vatten innan provtagningen.
4. Genomför venprovtagningen. Direkt vid provtagningen blandas blodprovet, vänd röret 10 gånger, och sätt tillbaka i isvattnet. **Observera att hela röret täcks av isvatten.**
5. Gå omedelbart till klinisk kemi med provet kvar i isvattnet.

