


## Snabbguide Graviditetstest NADAL 25 IU/L

new art laboratories



### NADAL<sup>®</sup> hCG Pregnancy Test (teststicka) snabbguide

REF 141002

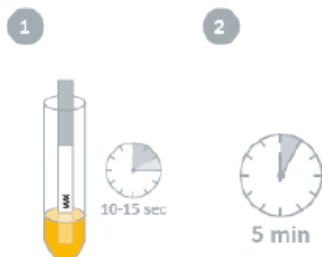

Läs hur hela förfarandet går till innan testet genomförs. Låt teststickor och urinprov uppnå rumstemperatur (15-30°C). Avlägsna teststickan ur förpackningen och håll i ändan där "hCG" är tryckt. Doppa stickan i 10-15 sekunder i urinprovet. Prowätskan bör inte nå högre än till det markerade max nedsättningsdjupet. Placera teststickan på en ren och plan yta som inte suger åt sig vätska (t.ex. på förpackningen).

Vänta tills den färgade linjen visas. Läs testresultatet efter 5 minuter, fastän prover med höga hCG halter kan visa positiva resultat redan efter 3 minuter. Tolka inte resultatet efter mer än 10 minuter.



**Positiv:**  
Två färgade linjer visas på membranet. En linje visas i kontrollområdet (C) och den andra linjen visas i testområdet (T).

**Negativ:**  
Endast en färgad linje visas i kontroll linjen (C). Ingen färgad linje visas på testet linje området (T).

We help you care!



nal von minden B.V.  
Mauritskade 37 - 2514HE The Hague - The Netherlands  
CEOs: Sandra von Minden - Roland Meißner - Thomas Zander  
Commercial reg. Klieve - HRB 5679  
Phone: 020 790906 - Fax: 020 798292

[www.nal-vonminden.com](http://www.nal-vonminden.com)