

Instruktion för desinfektion av flergångsvisir

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av visir

1. Desinfektera händerna med handsprit
2. Ta på skyddshandskar
3. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt
4. Desinfektera visirets
 - börja med insidan
 - ta därefter utsidan

Vissa visir kan kräva att man lägger dem på en stadig yta när de torkas av. I så fall är det viktigt att ytan desinfekteras innan visiret läggs ner och mellan avtorkningen av in- och utsida. Viktigt att de rengjorda delarna inte kontamineras på nytt!

5. Häng upp eller placera visiret på en ren yta så det kan torka
6. Ta av skyddshandskar
7. Desinfektera händerna med handsprit