


# **Kommunikationshjälpmedel Produktutbildning 2022-03-29**

**Logoped Frida Johansson  
Hjälpmedelscentralen**

# Logoped på Hjälpmedelscentralen

- Utprovningar.
- Rådgivning.
- Kurser.
- Delaktig vid upphandlingsarbete.
- Följa utveckling på området.
- Samarbete i teamet och bland konsulenterna.

# Förskrivningsprocessen

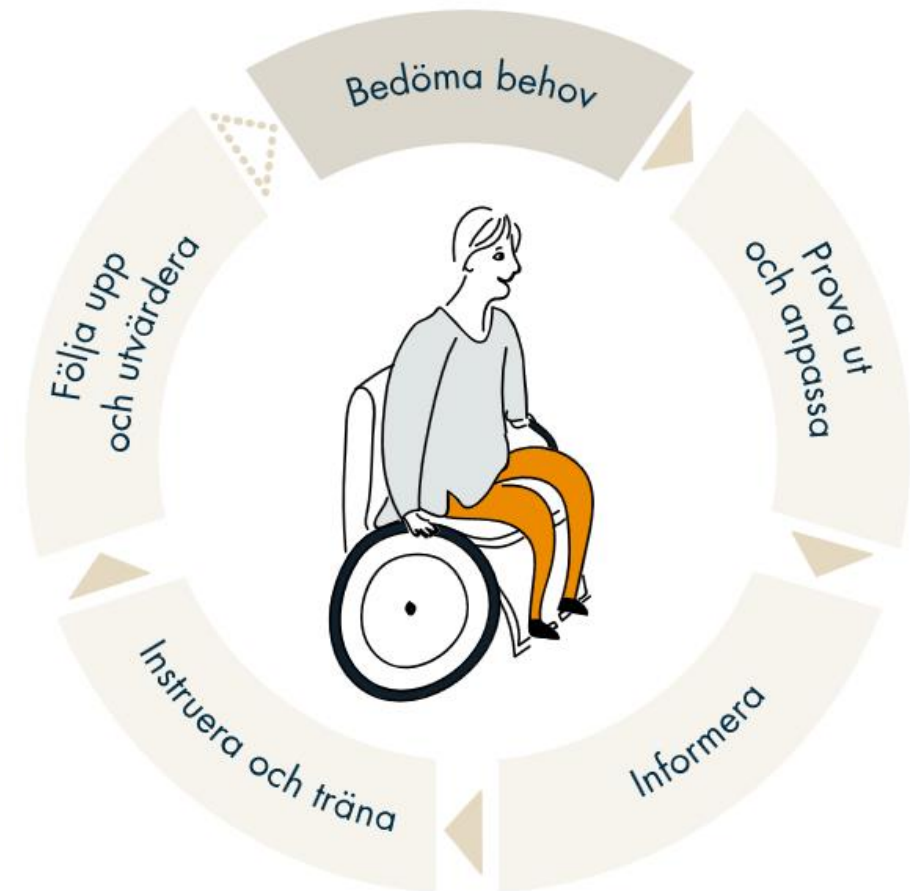

# Aktuell upphandling

- Avtal trädde i kraft 2022-03-01.
- Främst de tekniska kommunikationshjälpmedlen inkluderade.
- Hjälpmedel som inte upphandlas är t.ex. sådana som förskrivs sällan.
- Vårt sortiment innefattar produkter på avtal men även några utan avtal.
- Produkter i sortimentet ska väljas i första hand. Vid behov av att gå utanför sortimentet används rutinen för ordnat införande.
- Hänsyn har tagits till synpunkter från extern sortimentsgrupp.

# Val av hjälpmedel

Information om hjälpmedelsförskrivning finns på vår hemsida:

<https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/hjalpmedel/>

- Grundläggande information om förskrivning av hjälpmedel

*Folkhälsa och sjukvård – Vårdstöd – Hjälpmedel – Beställning och leverans av hjälpmedel – Att förskriva hjälpmedel*

- Vårt gemensamma regelverk

*Folkhälsa och sjukvård – Vårdstöd – Hjälpmedel – Regelverket för hjälpmedel*

- Beslutsstöd - ett verktyg för att skapa mer jämlika prioriteringar

*Folkhälsa och sjukvård – Vårdstöd – Hjälpmedel – Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning*

# Beslutsstöd ska användas

- Vid förskrivning av hjälpmedel med en högre inköpskostnad än 20 000 kronor – i dagsläget produkter markerade med **röd text och \*** i presentationen.
- När valet står mellan en grundmodell med lägre kostnad och ett alternativt hjälpmedel med högre kostnad och man överväger den dyrare produkten.
- Vid önskemål om förskrivning av hjälpmedel utanför sortiment vilket hanteras via rutinen för ordnat införande.
- Vid osäkerhet hos förskrivaren gällande åtgärdens relevans.
- Vid förskrivning av vissa utvalda hjälpmedel (t.ex. elrullstolar och GPS-larm).

# Aktuellt sortiment

- Finns listat i sortimentskatalogen i WebSesam. Sortimentskatalogen är inte statisk utan kan uppdateras vid behov.
- Har ni funderingar kring sortimentet eller ser medicinska behov hos patienterna som inte möts av aktuellt sortiment: kontakta logoped/konsulent för samråd.

# Tal och kommunikation

Tal och kommunikation

### Samtalsapparater

Samtalsapparater

- Samtalsapparat inspelnings- och uppspelningsbar med en tryckyta
- Samtalsapparat textbaserad med tangenter
- Digital samtalsapparat med touchskärm, symbolbaserad med stort färdigt vokabulär
- Digital samtalsapparat med touchskärm, textbaserad

### Kommunikationsdator

Kommunikationsdator

- Kommunikationsdator utan ögonstyrning
- Kommunikationsdator med integrerad ögonstyrning

### Röstförstärkare, röstgeneratorer och talventiler

Röstförstärkare, röstgeneratorer och talventiler

- Röstförstärkare
- Talventil
- Röstgenerator Provox TruTone EMOTE



# Samtalsapparat, inspelnings- och uppspelningsbar med en tryckyta

## BIGmack, LITTLEmack, BIG step-by-step

- Lättryckt hjälpmedel som lockar till att trycka.
- För bild och inspelat ljudmeddelande.
- Introduktion till talande hjälpmedel.
- Förmedla ett enda meddelande, t.ex. för att hälsa eller delta i lek.
- Påkalla uppmärksamhet i kombination med andra kommunikationssätt.



# Samtalsapparat, inspelnings- och uppspelningsbar med flera trycktytor

## iTalk4, GoTalk 9+

- Lättryckt eller skyddad från feltryck via nedsänkningar.
- För bilder och inspelade ljudmeddelanden.
- Introduktion till talande hjälpmedel.
- Förmedla flera olika meddelanden i några olika situationer.
- Möjlighet till taktill feedback.



# Samtalsapparat med touchskärm, symbolbaserad

## SC Tablet

- Stor symbolbas (PCS) och möjlighet att lägga in egna bilder.
- Talsyntes eller ljudinspelningar.
- Färdigt innehåll, kärnordförråd och situationsbaserat.
- Enstaka ord och fraser.
- Möjlighet till grammatiska justeringar.

Remiss skickas för  
utprovning

- Tangentbord.
- Individanpassningar direkt i apparaten.
- Möjlighet till mycket stort och växande antal ord.
- Raster kan beställas vid behov.
- Förberedd för skanning.



# Samtalsapparat, textbaserad med tangenter

## Lightwriter SL50\*

- Tangentbord (QWERTY eller ABC).
- Talsyntes.
- Ordprediktion och färdiga fraser.
- Fysiska knappar och raster.
- Kan parkopplas med mobiltelefon för telefonsamtal (både iOS & Android) och sms (endast Android).



# Samtalsapparat med touchskärm, textbaserad

## Talk Pad 10\*



- Tangentbord
- Ordprediktion och färdiga fraser.
- Möjlighet att lägga in ljudinspelningar från meddelandelagring.
- Möjlighet att överföra innehållet till kommunikationsdator med ögonstyrning vid behov.



Remiss skickas för  
utprovning

# Tal och kommunikation

## Tal och kommunikation

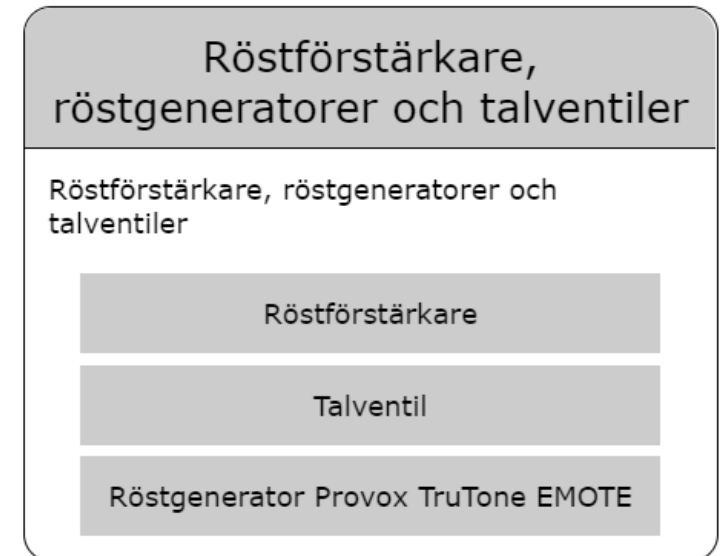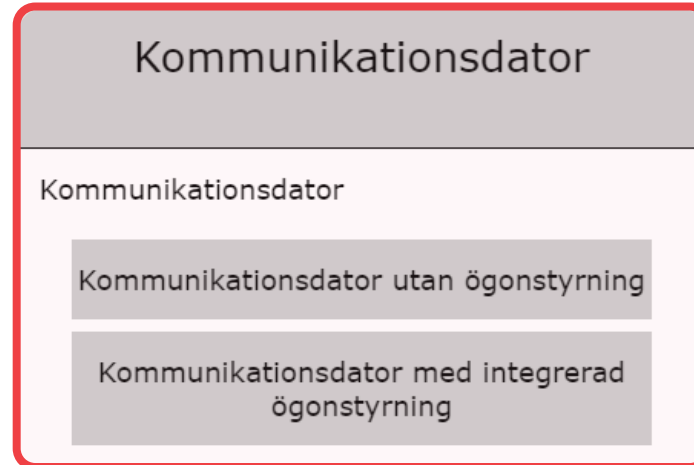

# Kommunikationsdator, utan/med integrerad ögonstyrning

## Grid Pad Pro 12\* eller Grid Pad Eye 12 Alea\*

- Symbolbaserat och textbaserat innehåll.
- Större skärm, större möjligheter till alternativa åtkomstsätt samt att anpassa symbolerna.
- Kan ge tillgänglighet till fjärrkommunikation, ordbehandling och samhällsinformation.
- Kan t.ex. passa person med synnedsättning, stora motoriska nedsättningar eller progressivt tillstånd.



Remiss skickas för  
utprovning



# Tal och kommunikation

Tal och kommunikation



# Röstförstärkare, röstgenerator och talventil

**Micro Voice Amplifier**



**Provox TruTone EMOTE**



**Provox Freehands Flexivoice Set Plus**



## Talflytshjälpmedel

Talflytshjälpmedel

SpeechEasyPRO

## Bildstöd

Bildstöd

Programvara för skapande av bildstöd

Abonnemang bildbas

Kommunikationspärmar och blisskartor

# Talflytshjälpmedel

## SpeechEasyPRO\*

- Hjälpmedel med funktion för DAF och FAF.
- Placeras bakom örat med en slang in i hörselgången.
- Utprovning sker vid DAKO i Halmstad.




Remiss skickas för  
utprovning



# Programvara för skapande av bildstöd


## InPrint 3

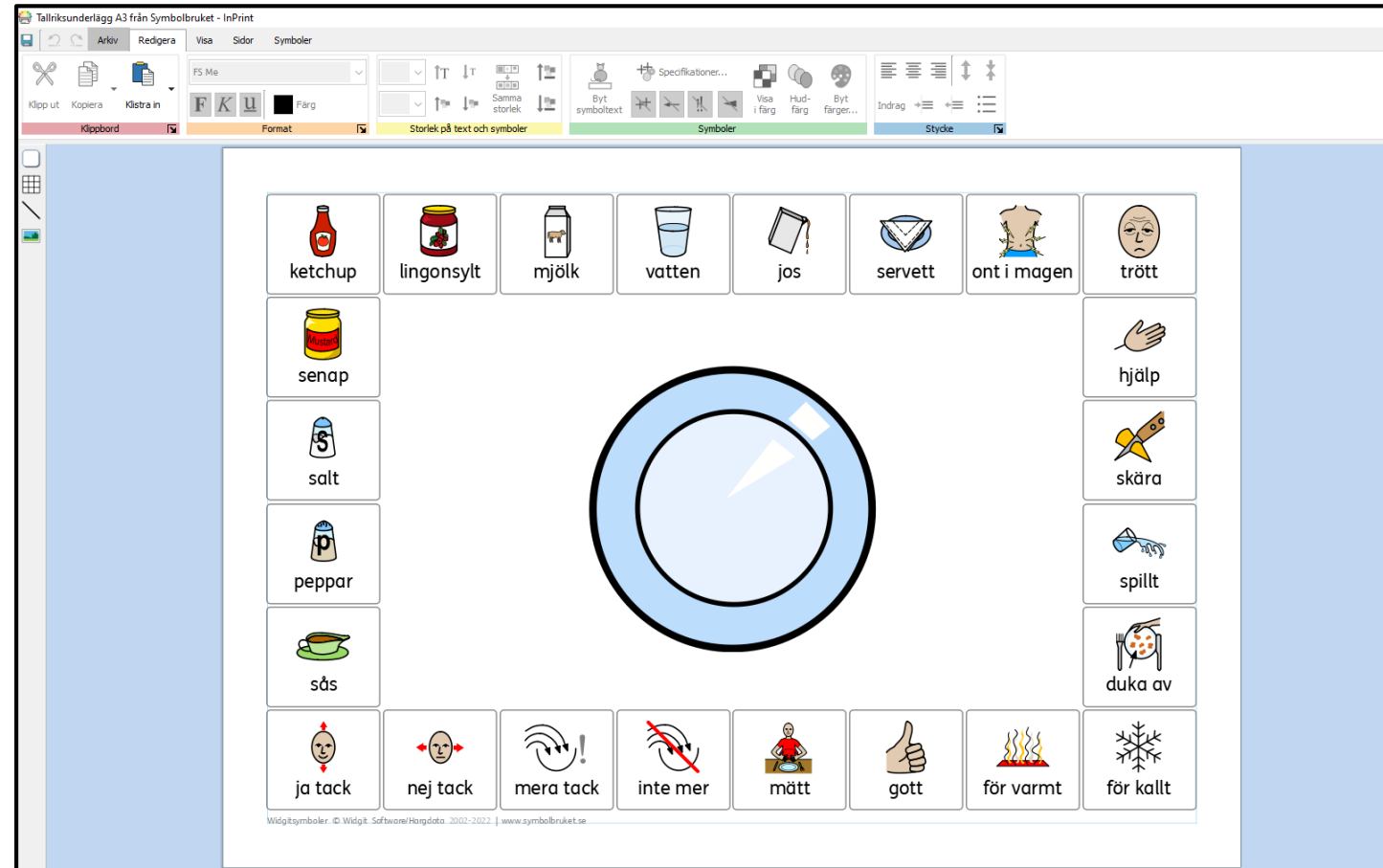

# Abonnemang bildbas

## Ritade tecken Bliss Online

Beställs via logoped/konsulent

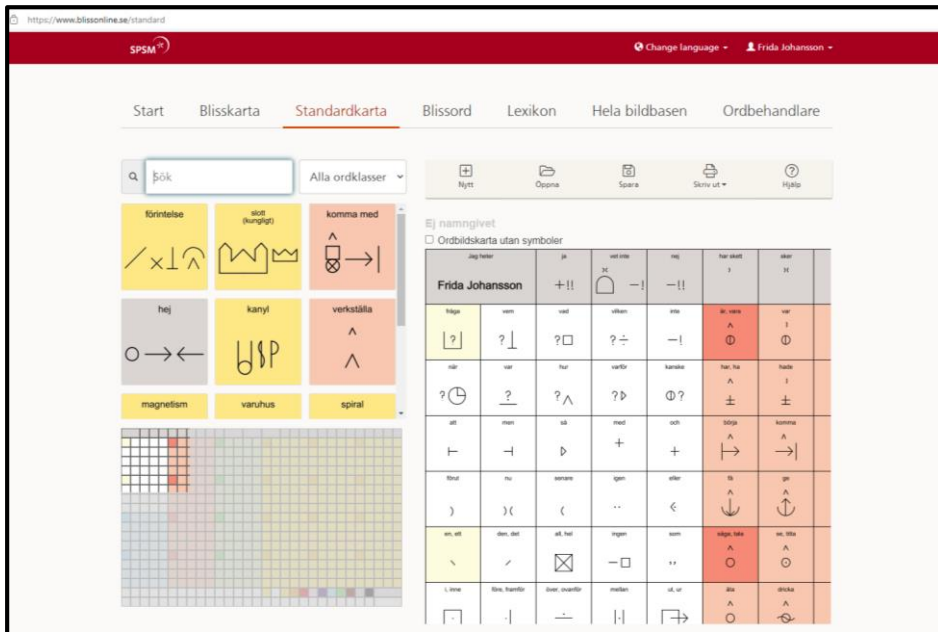

## **Kommunikationsböcker och mappar**

**Plastpärm 70x40** (*finns som utskriftsformat på Bliss Online*)

**Plastpärm 70x30** (*finns som utskriftsformat på Bliss Online samt passar A4*)

**Ögonpekningsram** (*passar bilder på 10x10 cm*)

**Mega-book** (*bok med 12 plastfickor för A4 samt en extra pärmsida*)

**Mid-sized kommunikationsbok** (*passar sidor på 17x12 cm*)

**Double Pocket-size kommunikationsbok** (*passar sidor på 12x8,5 cm*)

**Bildficka med 10 bildfack** (*passar bilder på 10x10 cm*)

**PECS-pärm** (*pärm i A5-format med axelrem och 8 registersidor*)



## Läs- och skrivhjälpmedel

Läs- och skrivhjälpmedel

<b>Daisyspelare</b>	<b>Programvaror för läs- och skrivsvårigheter</b>
Daisyspelare	Programvaror för läs- och skrivsvårigheter
<a href="#">Visa artiklar</a>	<a href="#">Visa artiklar</a>

# Daisyspelare


## Victor Stratus 4H

- Kan spela Daisyböcker och andra ljudfiler från CD-skivor, SD-kort eller USB-minnen.
- Ger möjlighet att navigera i bokstrukturen samt använda bokmärken.
- Ersättningskedja förekommer. Tidigare produkt: Plectalk PTN-2.




# Programvaror för läs- och skrivsvårigheter


## Symwriter

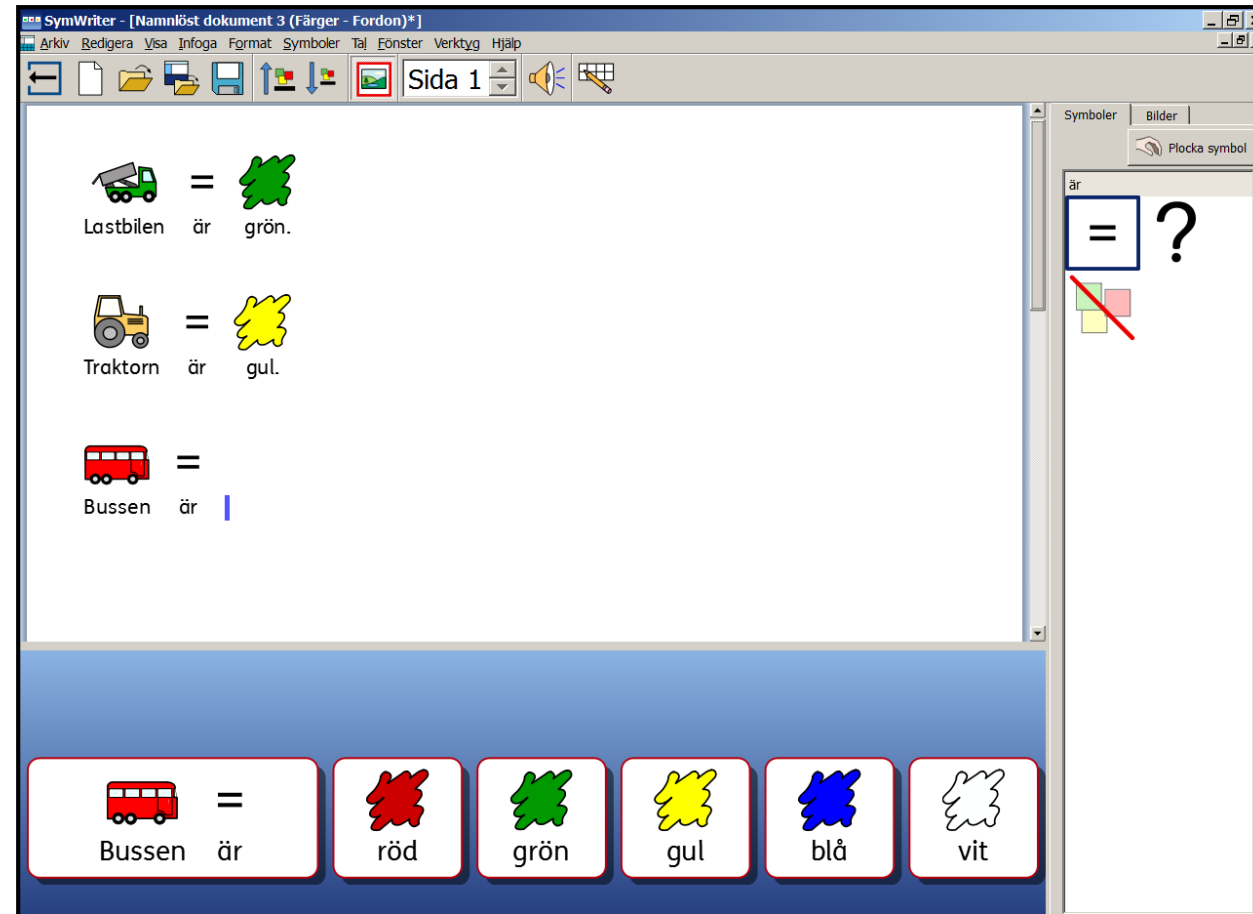

## ClaroRead Plus till PC eller Mac

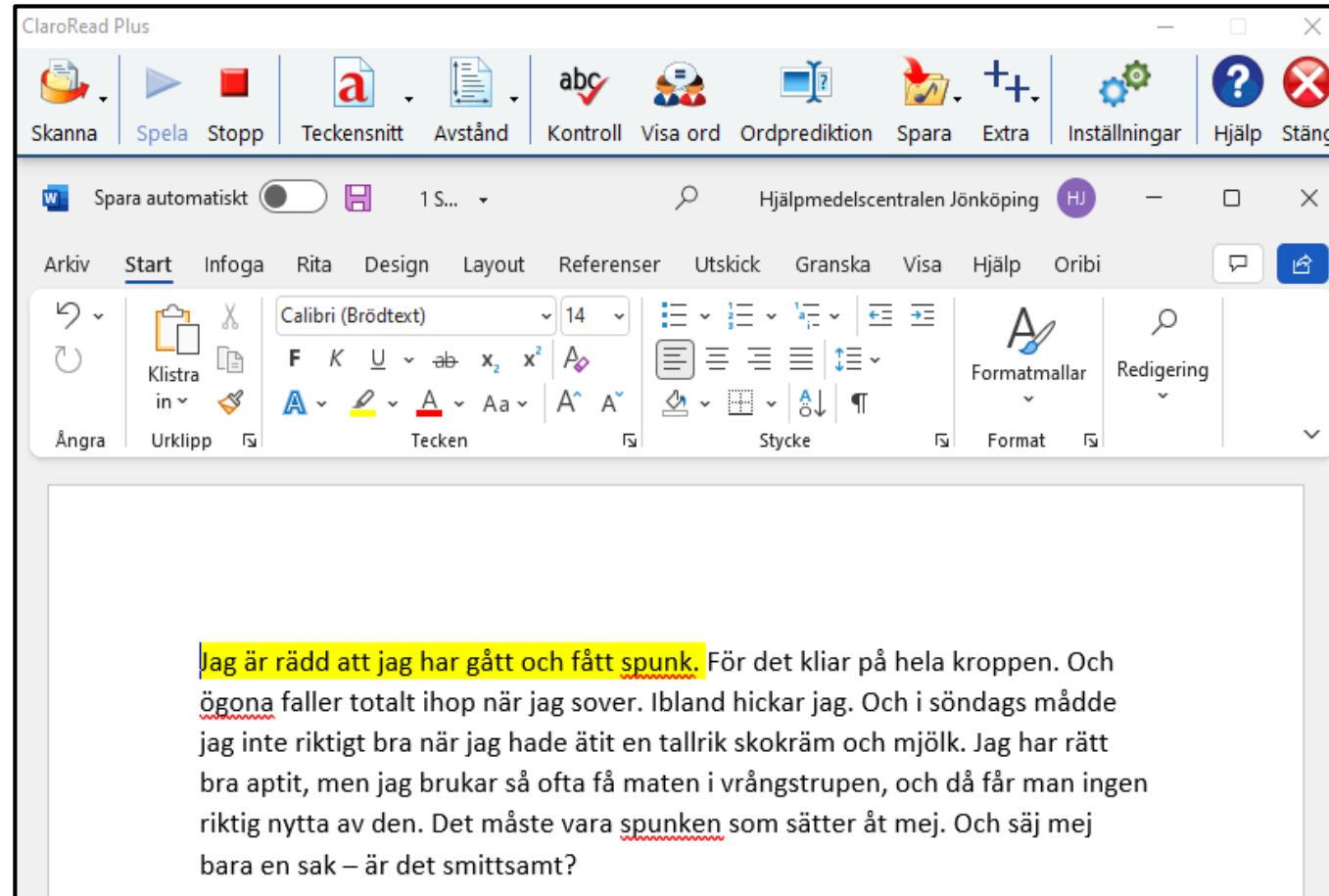


# Saida

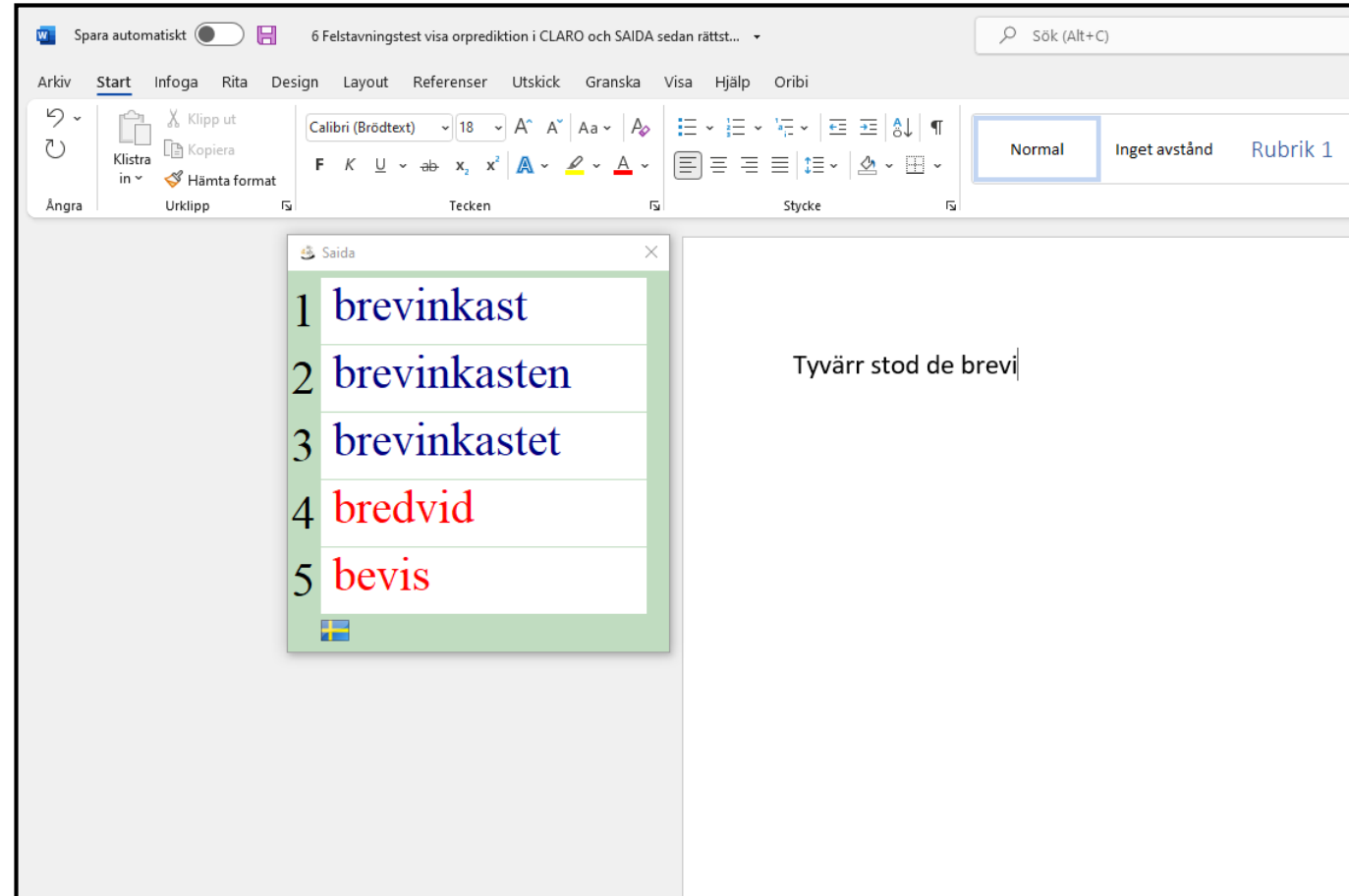

# StavaRex

## till PC eller Mac

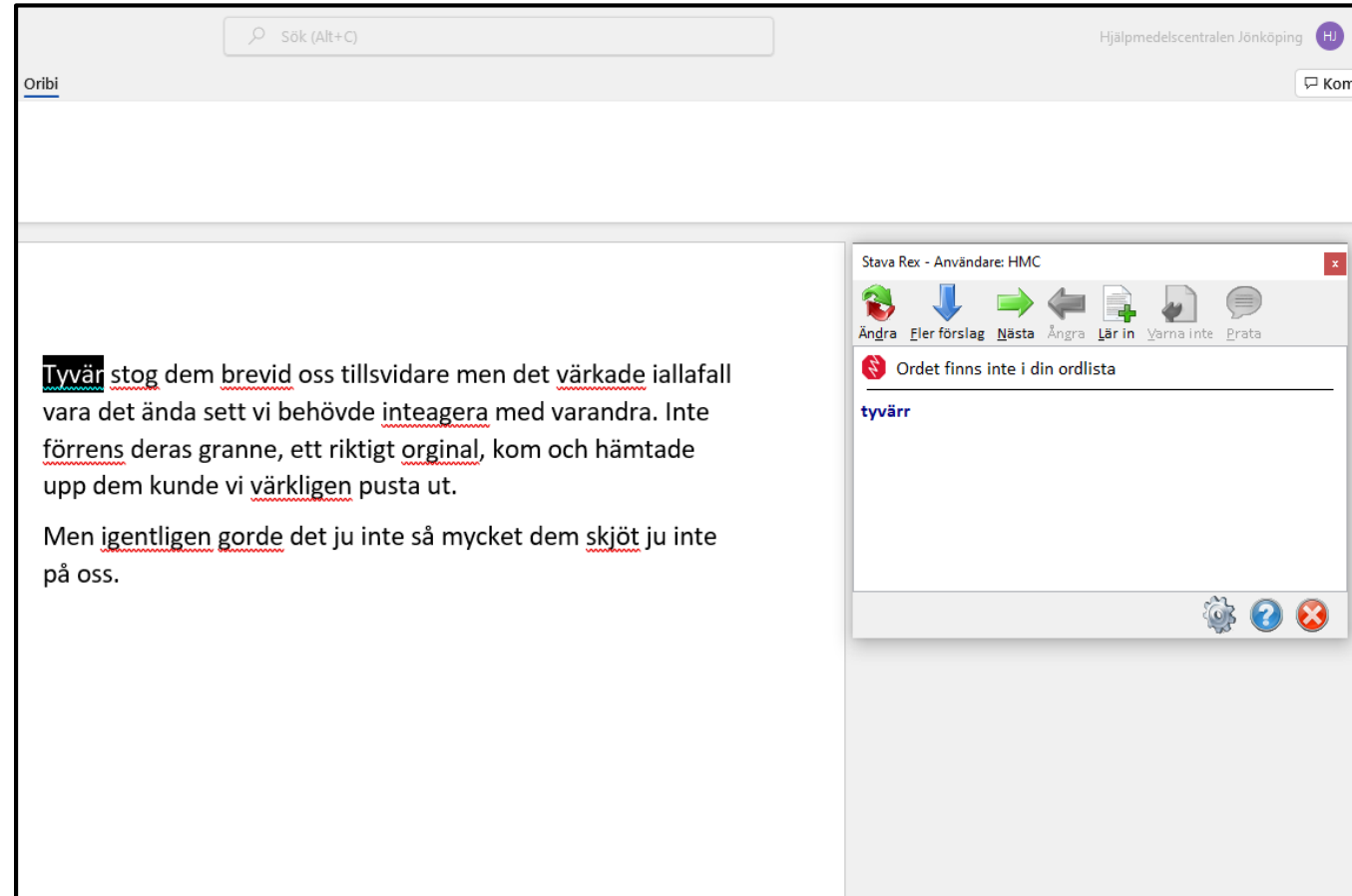

# Övrigt

**Laserpeklampa**

**Lumos Pointer för mitt- eller sidomontering**

**Hjälpmiddel för expiratorisk  
muskelstyrketräning (EMST)  
vid sväljningsrehabilitering**

**EMST150**



Beställs via logoped/konsulent

# När du beställer själv i webSESAM

Kom ihåg att välja  
förskrivningssyfte  
"LOG".

The screenshot shows the webSESAM interface for creating a sales order. The browser address bar displays the URL: <https://websesam.rjl.se/SalesOrder/SalesOrder.aspx?ParameterId=b32c5267-e346-4d2b-98bc-b87fb17188e6>. The page header includes the user name 'HMCJON Tiotusen' and the application name 'webSESAM'. There are links for 'Information', 'Skriv ut', 'Hjälpe', and 'Avsluta'. A navigation menu on the right lists various functions like 'Hjälpmedel', 'Individkort', 'Sortimentskatalog', etc. The main form area contains fields for 'Mottagare' (Tolvan), 'Betalsansvar' (SB001 Jönköpings kommun Ramsaygården), and 'Kompletera levererad individ'. The 'Artikel' field is empty, and the 'Förskrivningssyfte' dropdown is set to 'LOG Logoped', highlighted by a red arrow. The 'Antal' field is set to '1'. Below the form are buttons for 'Lägg till', 'Spara ändringarna', and 'Avbryt'. At the bottom, there is a table with columns: Artikel, Benämning/Betalare, Lager, Individ, Lev.datum, Avser, Antal, Enhet, Å-pris, Totalt, Kommentar/Bilaga, Ta bort, and Kompl. individ. The table currently shows 'Ingen träff.'



# Bra att veta inför remiss

- Formulera problem och mål.
- Hur kommunicerar personen? Vad ska hjälpmedlet tillföra?
- Intressen och motivation?
- Vad har provats hittills?
- Möjlighet att peka/trycka/styra? Vilken kroppsdel?
- Stöd i omgivningen?
- Vid alternativt styrsätt eller montering: samarbete med AT lämpligt.

# Kontaktuppgifter HMC

Kundservice: 010-242 87 00



**Carina Svensson**  
Hjälpmedelskonsulent

[carina.svensson@rjl.se](mailto:carina.svensson@rjl.se)  
010-242 87 04



**Frida Johansson**  
Logoped

[frida.a.johansson@rjl.se](mailto:frida.a.johansson@rjl.se)  
010-242 87 28



**Jonatan Tedenby**  
Hjälpmedelstekniker

[jonatan.tedenby@rjl.se](mailto:jonatan.tedenby@rjl.se)  
010-242 87 47

# Tack för visat intresse!

Vi är tacksamma om ni fyller i enkäten som skickas från LoK.