

Daglig kontroll av spoldesinfektorn

Spoldesinfektorns ID-nummer _____

Kontrollera efter varje process att:

- godset är synligt rent
- rätt temperatur uppnåtts på displayen eller att indikeringslampan lyser grönt

Kontrollera varje dag att:

- spolmunstycken är rena och inte igensatta
- rörliga spolmunstycken roterar lätt
- avloppet är fritt
- kammare, lucka och insatser är rena. Rengör vid behov!

Kontrollera varje _____

(fyll i valfri veckodag) att:

- det finns diskmedel i behållaren och att rimlig mängd gått åt
- Markera med datum på behållaren.**

Enhet _____

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Efter genomförd kontroll: Signera!