

VORTEX kort bruksanvisning på svenska

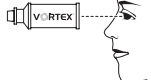
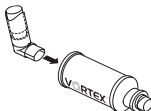
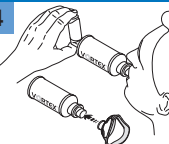
VORTEX® kort bruksanvisning



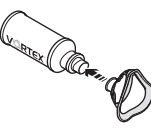
– Användar instruktioner (för användning i hemmet) –



Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan VORTEX® tas i bruk.

- 1** 
 - ☑ Kontrollera alltid innan du använder VORTEX® att det inte finns några främmande element eller skador på produkten.
- 2** 
 - ☑ Ta bort förslutningen på sprayen.
 - ☑ Skaka sprayen kraftigt. Beakta bruksanvisningen till din spray.
- 3** 
 - ☑ Sätt sprayens munstycke i anslutningsringen på VORTEX® – behållaren
- 4** 

Sätt munstycket med utandningsventil i munnen. Alternativt, sätt masken över mun och näsa.
- 5** 
 - ☑ Spraya in läkemedlet och dra ett djupt, långsamt andetag.
 - ☑ Håll andan en kort stund.
 - ☑ Andas ut långsamt.

Se till att endast en dos läkemedel sprayas in i VORTEX® vid varje användning.
- 6** 

Att använda VORTEX® med mask:

 - ☑ Se till att masken sluter tätt mot ansiktet.
 - ☑ Spraya in läkemedlet i början av en långsam inandning.
 - ☑ För barn under 18 månader, håll masken tätt mot barnets ansikte under 4-6 andetag och för barn över 18 månader under 2-4 andetag.
- 7** 

Om du behöver mer än en dos:
Vänta och följ sedan bruksanvisningen till sprayen och upprepa instruktionerna i steg 4 och 5.

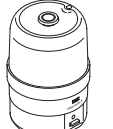
VORTEX® kort bruksanvisning



Rengöring

VORTEX® måste (se fig. 8-13)

- ☑ rengöras före första användandet
- ☑ Var noga med att rengöra VORTEX®. Vid synlig nedsmutsning skall VORTEX® rengöras direkt.
- ☑ VORTEX® kan rengöras enligt följande:

- 8** 
 - ☑ Ta av anslutningsringen och masken (om sådan finns).
- 9** 
 - ☑ Rengör alla delar grundligt med varmt kranvatten (ca. 40 °C) och lite diskmedel (dosera enligt anvisningen från diskmedelstillverkaren).
- 10** 
 - ☑ Skölj alla delarna noggrant med rent vatten och skaka sedan av vattnet.
- 11** 

Desinfektion

 - ☑ **Rekommenderad metod:**
Med vaporisator eller desinfektionsapparat.
- 12** 
 - ☑ **Alternativ: kokande vatten:**
Lägg VORTEX®-delarna och masken minst 15 min. i kokande vatten. Se till att det finns tillräcklig med vatten i kastrullen.
- 13** 

Torkning

 - ☑ VORTEX® måste torkas fullständigt. Med tanke på de antistatiska egenskaperna hos VORTEX® kan den torkas med en ren diskhandduk.

Distributör: Active Care Sverup AB

Uggledalsvägen 47 · 427 40 Billdal
Tel: 031-917525 · Fax: 031-917505
E-post: info@activecare.se
hemsida: www.activecare.se



PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg

Specialister på effektiv inhalation

