

Daglig rengöring av mobil unit BPR combi cart clinic

Vid uppstart - fyll färskt vatten i vattenbehållarna. Spola instrumentslangarna med färskt vatten några sekunder.

Efter användning – samt vid dagens slut:

1. Rengöring sugslangar

Sugslangar rengörs med rengöringsvätska, t.ex. Orotol Plus enligt producentens instruktioner på flaskan.



2. Tömning avfallstank

Därefter lossas avfallstankar och töms i diskho med amalgamavskiljare. Avfallstankar kan köras i diskdesinfektor eller autoklav.



3. Rengöring översvämningsskydd

Rengör översvämningsskyddet och torka torr med trasa.



4. Rengöring vattenflaskor

Vattenflaskor avmonteras och rengörs i diskdesinfektor, får ej autoklaveras!



5. Sprita av unit

Rengöring och desinfektion av ytor och yttre slangar enligt rutin

Veckorengöring av instrumentslangar

Rengör instrumentslangarna med t.ex. EMS Night cleaner (DAB art nr: 734881). Töm vattentanken och fyll på lite medel och spola tills blå vätska kommer ut ur instrumentslangarna. Låt stå över natten enligt instruktion och spola sedan slangarna med rent färskt vatten.