

Exponeringstabell för intraorala digitala röntgenbilder

Klinik: _____

Fastställt datum: 2016-07-20/HJ

Intraoral utrustning: Prostyle Intra Planmeca

Sensor: Schick 33 Sirona (Unident)

Pacs: Schick-Pacs

Exponeringstabellen gäller en normalpatient korrigering görs för liten eller kraftig patient med ett tids-steg ned eller upp.

Riktmedel fokus-ände riktmedel: ca 30 cm

Rörspänning : 63 kV

Projektion	Exponeringstid för normalpatient (s) Schick 33 Sirona
Aplikalröntgen	
Central incisiv ÖK	0,120
Lateral incisiv ÖK	0,100
Kanin ÖK	0,120
Premolar ÖK	0,120
Molar ÖK	0,160
8-or ÖK	0,200
Central incisiv UK	0,100
Kanin UK	0,100
Premolar UK	0,100
Molar UK	0,120
8-or UK	0,120

Premolar BW	0,100
Molar BW	0,120

Fixturer	0,100
-----------------	-------

Kommentar: Vid tveksamheter exponera hellre en lite för mörk bild som kan korrigeras än tvärt om. D-Rutan skall exponeras med samma rörspänning som patienterna. Förslag: 63 kV, 0,25s för Schick 33.

Vid frågor kontakta: Vid frågor kontakta: OnkologklinikenJonkoping.Rontgenfysik@rjl.se.

Mer information finns på intranätet under Regionen / Hälsa och vård / Diagnostik / Sjukhusfysik /Röntgenfysik.