

Rengöring av BA-tube - i ordinärt och särskilt boende

Plocka isär BA-tuben genom att placera medföljande svarta pistong i tuben och tryck av hatten med tummen eller mot ett hårt underlag.

En gång/dag

Skölj delarna med varmt vatten. Skaka av och låt lufttorka.

En gång/vecka

Diska delarna med diskmedel och varmt vatten eller i diskmaskin. Skaka av delarna och låt lufttorka.

OBS!

Delarna ska vara torra innan de sätts ihop.

Se till att hattens pil riktas mot sifferskalan när du sätter ihop BA-Tube. Tryck ihop tills det knäpper till.

I särskilt boende:

Innan rengöring var noga med att märka upp vem BA-tuben tillhör. I möjligaste mån rengörs BA-tuben i användarens rum/lägenhet.

