



# Analyz F. O. B Test

## UTFÖRANDE av F.O.B Test / Test för dolt blod i avföring Testet ska aldrig utföras på synligt blod


### PROVINSAMLING

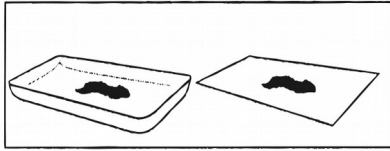


**1** Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på.

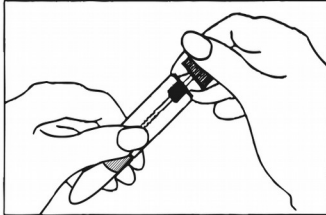


**2** Skruva av den **BLÅ** korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Den vita änden ska förbli orörd.

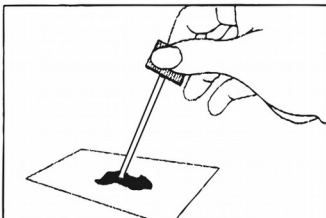

**3** Stoppa den **BLÅ** provpinnens ände på flera olika ställen av avföringen.

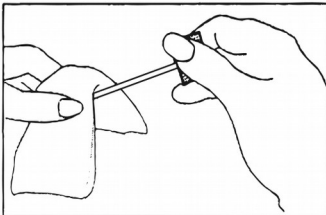


**4** Torka bort överflöd av avföring från provpinnen genom att försiktigt stryka mot toalettpapper.

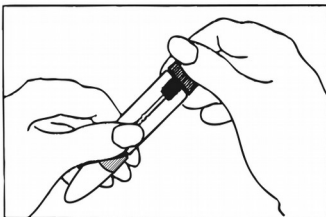


**5** Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.

**6** Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagning.


### TESTUTFÖRANDE

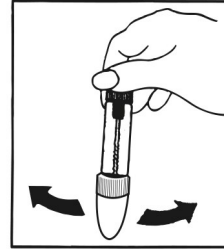

**1** Skaka röret kraftigt för att blanda vätskelösningen.

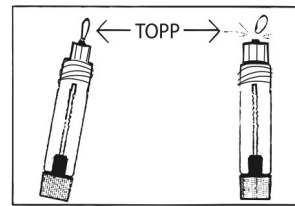

**2** Håll röret rakt upp, skruva av den vita skyddshylsan och bryt av toppen.

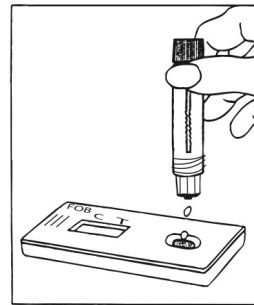


**3** Droppa **3** droppar av lösningen i provbrunnen.


**4** Läs resultatet vid **5** minuter. (Läs **aldrig** senare än **5 minuter!**)

**Provet är nu klart för test och kan förvaras i rumstemperatur.  
Provet ska testas inom 7 dagar från provtagning.**


### AVLÄSNING AV TEST

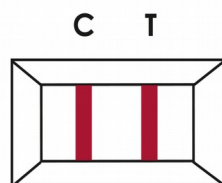

**POSITIV**

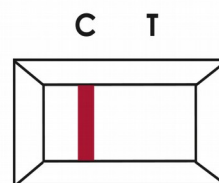

**NEGATIV**

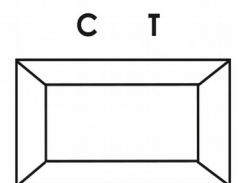

**OGILTIG**

