

## Rengöring av PEP-mask Laerdal - i ordinärt och särskilt boende

Plocka isär PEP-masken enligt bilden till vänster.

### En gång/dag

Skölj alla delar med varmt vatten. Torka bort synlig smuts.

Skaka av och låt lufttorka. Sätt ihop enligt bilden till höger.

### En gång/vecka

Diska alla delar med varmt vatten och diskmedel eller diska i diskmaskin. Koka därefter alla delar i ca 3 minuter. Skaka av och låt lufttorka. Sätt ihop masken enligt bilden till höger.

### I särskilt boende:

Innan rengöring var noga med att märka upp vem PEP-masken tillhör. I möjligaste mån rengörs PEP-masken i användarens rum/lägenhet. Om diskdesinfektor finns ska denna användas för rengöring en gång i veckan.

**Isärplockad PEP-mask Laerdal**



**Ihopsatt PEP-mask Laerdal**

