

## Provtagningsrutin vid Viral Hemorragisk feber, Högsmittsam Allvarlig Infektion (HSAI)

Papperskopior på dokumentet finns i HSAI-lådan på laboratoriemedicin

| Provtagningsmaterial             | Analys                                              | Hantering                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Blodgasspruta *                | Blodgas, Laktat, Elektrolyter<br>Glukos, Hb och CRP | Rumsbundet                                               |
| 1 EDTA-rör (Lila propp)          | Malaria, snabbtest                                  | Rumsbundet                                               |
| Blodlingsflaskor **              | Blododling                                          | Rumsbundet                                               |
| Enl. överenskommelse<br>med FoHM | Virala Hemorragiska febrar                          | Transport till FoHM<br>(Sthlm), se<br>transportanvisning |

\* Blodgasspruta PICO A för provtagning från infart, funktionell på epoc, levereras i Lab-lådan tillsammans med övrigt material.

\*\* Vid **negativt** svar från FoHM skickas Blododling till Laboratoriet för analys, märk flaskorna med text: Stått på avdelning i X antal dygn.

**epoc:** Aktivering av Elektrolyter och provtyp Venös, se specifik snabbguide

### Blodgasspruta:

1. Analys av Blodgas, Laktat och Elektrolyter på epoc
2. Analys av Glukos, Hb (HemoCue) och CRP (Afinion):  
Tryck ut 3 bloddroppar på icke absorberande underlag t.ex. insidan av kuvett-förpackningen

### EDTA-rör (Lila propp):

Analys av Malaria, snabbtest