

Hantering av munskydd, praktisk anvisning för vårdpersonal.

Munskydd med knytband

Så här sätter du på munskyddet:

- Sprita händerna.
- Placera munskyddet över näsa, mun och haka.
- Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra.
- Fäst banden bakom huvudet.
- Justera munskyddet så att det sitter bra runt näsan, mun och haka.




Så här tar du av munskyddet:

- Sprita händerna.
- Knyt upp banden utan att ta i själva munskyddet.
- Börja med det nedre bandet, därefter det övre.
- Lyft munskyddet från ansiktet i banden.



Efter användning:

- Lägg munskyddet i sopbehållare utan att byta grepp.
- Sprita händerna.

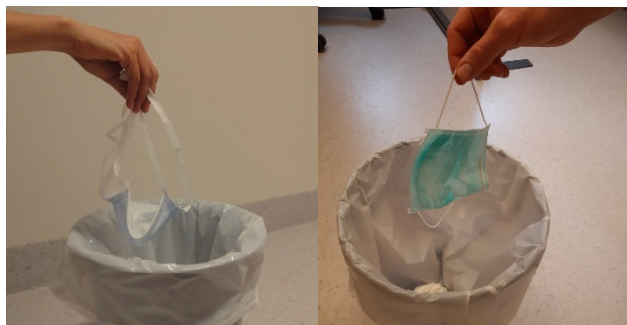

Munskydd med öronband

Så här sätter du på munskyddet:

- Sprita händerna.
- Placera munskyddet över näsa, mun och haka och trä upp runt öronen.
- Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra.
- Justera munskyddet så att det sitter bra runt näsan, mun och haka.

Så här tar du av munskyddet:

- Sprita händerna.
- Ta med båda händerna loss öronbanden och lyft munskyddet från ansiktet.

Efter användning:

- Lägg munskyddet i sopbehållare utan att byta grepp.
- Sprita händerna.