



Hur man använder  
**BARRIER®** filtrerande andningskydd

## Påtagning av Barrier® filtrerande andningskydd



1. Separera övre och nedre kanter på andningskyddet.



2. Kupa andningskyddet under hakan och dra banden över huvudet.



3. Placera det övre bandet ovanför öronen och det undre bandet under öronen.



4. Justera näsklämman över näsan med båda händerna och se till att det sluter tätt mot huden. Justera andningskyddet så det sitter bekvämt och har en säker passform. Utför tätningskontroll (se nedan) och justera andningskyddet om det behövs.

## Avtagning av Barrier® filtrerande andningskydd



1. Ta tag i banden och dra dem över huvudet.



2. Släng andningskyddet direkt efter användning, håll endast i banden. Desinficera dina händer.

## Kontroll av andningskyddets försegling

Tätningskontrollen bör genomföras varje gång ett nytt filtrerande andningskydd tas på. Andas ut kraftigt när du bär andningskyddet. Läcker det ut luft längs näsa, haka och kinder, justera näsklämman så att den passar ansiktsformen. Om luft kommer ut nära andningskyddets kanter, försök att rätta till banden eller justera munskyddet för bättre passform. Om andningskyddet inte passar ordentligt kan dess funktion inte garanteras.

### Om luft läcker runt näsan

Använd båda händerna för att justera näspartiet genom att placera fingertopparna högst upp på metallnäsklämman. Skjut fingertopparna ner på båda sidor av metallremsan för att effektivt forma den efter din näsform.

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031 722 30 00  
Varumärkena, namn och logotyper Mölnlycke och BARRIER registreras globalt till ett eller flera av  
Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.