

Daglig kontroll av diskdesinfektor

Diskdesinfektorns ID-nummer _____

Enhet _____

Kontrollera efter varje process att:

- godset är synligt rent
- rätt temperatur uppnåtts på displayen eller att indikeringslampan lyser grönt

Kontrollera varje dag att:

- diskarmarna roterar lätt och är rätt vända
- spolhålen på diskarmarna är rena och inte igensatta
- silen är ren, rensa vid behov
- insatser är hela och dockar ordentligt mot vattenanslutning där sådan finns
- inga föremål fallit ner i botten samt att kammare, lucka och insatser är rena. Rengör vid behov!

Kontrollera varje _____

(fyll i valfri veckodag) **att:**

- det finns diskmedel och eventuellt sköljmedel i behållaren, samt att rimlig mängd gått åt (Markera med datum på behållaren)

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Efter genomförd kontroll: Signera!