

Rengöring PEP-ventil - i ordinärt och särskilt boende

Plocka isär genom att ta ur motstånd (den färgade nippeln) från ventilen som bilden nedan visar.

En gång/dag

Skölj alla delar med varmt vatten.

Skaka av och låt lufttorka. Sätt ihop enligt bilden till höger.

En gång/vecka

Diska alla delar med varmt vatten och diskmedel eller diska i diskmaskin. Skölj noga. Koka därefter alla delar i ca 3 minuter. Skaka av och låt lufttorka. Sätt ihop enligt bilden till höger.

I särskilt boende:

Innan rengöring var noga med att märka upp vem PEP-ventilen tillhör. I möjligaste mån rengörs PEP-ventilen i användarens rum/lägenhet. Om diskdesinfektor finns ska denna användas för rengöring en gång i veckan.

Isärplockad PEP-ventil



Ihopsatt PEP-ventil

