

## Handhavande Graviditetstest 500IU/L med Unistep hCG-teststicka

### 1 Provtagning

Se laboratoriemedicins provtagnings-handbok


[folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/](http://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/)

### 2 Utförande

- Låt urinprovet anta rumstemperatur (20-30 °C) innan testet utförs.
- Ta ut teststicken ur den förseglade påsen. Teststicken måste användas inom en timme.
- Sänk ner teststicken med pilarna mot urinprovet i minst 15 sekunder. Var noga med att inte passera markeringen för max-linje när stickan sänks ner i urinen.
- Lägg stickan på en icke absorberande plan yta. Starta tidtagaren.
- Testet avläses efter 3 minuter. Avläs inte efter 10 minuter.

### 3 Tolkning av resultat

Testet visar positivt vid hCG- koncentrationer >500 IU/L

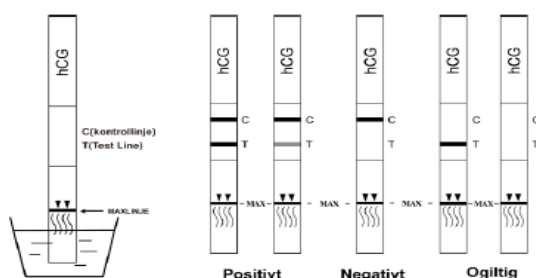

#### 3.1 Positivt:

Två tydliga färgade streck syns, den ena i testområdet (T) och den andra i kontrollområdet (C).

Ett streck kan vara svagare än det andra, de behöver inte vara lika starka

#### 3.2 Negativt:

Ett färgat streck syns i kontrollområdet (C). Inget streck syns i testområdet (T)

Om ingen linje framträder i kontrollområdet (C) är resultatet ogiltigt och testet ska göras om.

### 3.3 Svarsrutin

U-hCG (remsa): Positiv;

U-hCG (remsa): Negativ

### 3.4 Intern kontroll

I testet ingår en funktionskontroll. En färgad linje som framträder i kontrollområdet (C). Kontrollinjen bekräftar att tillräckligt provmaterial har tillsatts och att en korrekt användningsteknik har använts. Om ingen linje framträder i kontrollområdet (C) är resultatet ogiltigt och testet ska göras om. En klar bakgrundsfärg är en inbyggd negativ funktionskontroll. Om en bakgrundsfärg syns i testområdet och försvårar avläsningen av testresultatet är resultatet ogiltigt.